

PLAN DE L'HYGIÈNE

oneway Suisse GmbH
Dorfplatz 11
CH - 8737 Gommiswald

Tel. 055 293 23 90
info@oneway-suisse.com
www.oneway-suisse.ch



PRODUIT	POUR	APPLICATION	PRÉPARATION DE LA SOLUTION	NOTES
 <p>PLIWA® Derm Désinfection pour les mains</p>	Désinfection hygiénique pour les mains	Se frotter les mains avec la solution et les maintenir humides pendant 30 secondes.	Solution prête à l'emploi	Les durées indiquées sont des durées minimales. Les temps doivent éventuellement être prolongés si la solution le nécessite. Étant donné que la solution n'a pas d'effet sporidic, elle ne peut pas être utilisée pour conserver des instruments et des seringues.
 <p>PLIWA® Biguaton forte Neu Désinfection des instruments</p>	<ul style="list-style-type: none"> Instruments médicaux Équipements de laboratoire en verre, porcelaine, métal, caoutchouc, plastique, etc. Accessoires d'anesthésie thermolabiles Endoscopes rigides et souples 	Diluer le concentré avec de l'eau chaude à 30 à 40 °C. Après chaque utilisation, rincez les instruments avant utilisation et placez-les dans la solution. Rincer soigneusement les instruments et faites-les sécher.	<p>Concentré Eau nécessaire</p> <p>Temps d'action 5 - 60 min</p>	Convient à toutes les méthodes de circulation et à tous les appareils à ultrasons. Pour une efficacité optimale, il est recommandé de changer la solution tous les jours. Important : le plateau d'instruments doit être soigneusement nettoyé avant la première utilisation. Il ne doit pas contenir des résidus d'autres solutions d'instruments.
 <p>PLIWA® Roto-Pren Désinfectant pour les fraises dentaires</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fraises dentaires Instruments rotatifs de précision 	Déposer les fraises dans la solution immédiatement après chaque utilisation (sans pré-lavage). Rincer ensuite les instruments à l'eau douce et sécher.	<p>Solution prête à l'emploi</p> <p>Temps d'action 1 - 5 min</p>	Ne pas faire tremper des pièces en aluminium. Ne pas mélanger avec d'autres produits de nettoyage. Pour une efficacité optimale, changer la solution tous les jours.
 <p>PLIWA® Lemon Fresh AF Spray désinfectant citron</p>	<ul style="list-style-type: none"> Surface Meubles Vêtements 	Vaporiser la solution non diluée sur les objets et les surfaces à nettoyer, et laisser agir. Essuyer éventuellement l'excédent de solution à l'aide d'un chiffon sec à usage unique.	<p>Pour la désinfection de 1 m², utiliser 15 à 20 ml</p> <p>Temps d'action 30 sec - 5 min</p>	Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles à l'alcool, comme le polyméthacrylate de méthyle ou le cuir!
 <p>PLIWA® Lingettes désinfectantes Lemon Fresh AF</p>	<ul style="list-style-type: none"> Surface Meubles Vêtements 	Bien essuyer les objets, les surfaces et les pièces, et laisser sécher. Réutiliser uniquement à la fin du temps d'action.	<p>Solution prête à l'emploi</p> <p>Temps d'action 30 sec - 5 min</p>	Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles à l'alcool, comme le polyméthacrylate de méthyle ou le cuir!
 <p>PLIWA® Mikroclean Plus D Désinfection des systèmes d'aspiration</p>	<ul style="list-style-type: none"> Systèmes d'aspiration 	Aspirez 1 litre de la solution fraîchement préparée à travers les tuyaux etc. à nettoyer au moins 1 à 2 fois par jour après la fin du travail.	<p>Concentré Ajout d'eau nécessaire</p> <p>Temps d'exposition 1 - 60 min</p>	<p>Ne pas laisser agir toute la nuit ou plus de 48 heures. Préparez une nouvelle solution de travail pour chaque processus de désinfection.</p> <p>Ne pas mélanger avec des additifs ou autres préparations !</p>
 <p>oneway® Filtres jetables</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dispositifs d'aspiration Dispositif automatique de séparation Supports sélectifs 	Mettre le filtre à usage unique dans le support.		Les filtres à usage unique doivent être remplacés deux fois par semaine.